

Käyttöohje

iFlo-lämpömaski

Malli: VEM-200



VisuScience Meditech Co., Ltd.

Address: Room 501,503 Ruiyun 5 No. 99 Furongzhongsan Rd., Wuxi, China

Tel: +86 510 85757880 Email: info@visuscience.com

Website: www.visuscience.com



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA

Capelle aan den IJssel, The Netherlands

© 2019-2026 VisuScience. All rights reserved. Version 010926_001



Maahantuoja: EyeVision Oy

Rauhalantie 4 B 105, 33480 Ylöjärvi

eyevision@eyevision.fi

www.eyevision.fi



EyeVision



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä

Sisällysluettelo

1. iFlo-silmämaskin käyttötarkoitus.....	2
2. iFlo-silmämaskin rakenne	2
3. iFlo-silmämaskin käyttö.....	3
4. iFlo-silmämaskin huolto ja puhdistus.....	3
5. iFlo-silmämaskin sisäkangas	3
6. iFlo-silmämaskin ominaisuudet	4
7. Pakkauksen sisältö	4
8. Vianmääritys	4

⚠ Varoitus

- 1) Käytä ainoastaan alkuperäistä valmistajan toimittamaa lämpötilansäätökaapelia.
- 2) Käytä ainoastaan CE-sertifioitua virtalähdettä tai virtapankkia.
- 3) Käytä silmämaskia varoen ja varmista ja säädä oikea lämpötila ennen käyttöä.
- 4) Jos sinulla on todettu jokin silmäsairaus, silmävamma tai korkea silmänpaine, keskustele tuotteen käytöstä lääkärin kanssa ennen sen käyttöä.
- 5) Jos tunnet olosi epämukavaksi käytön jälkeen, lopeta tuotteen käyttö ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.
- 6) Jos lämpötila tuntuu liian korkealta (kaikki ihotyypit kokevat lämpötilaerot eri tavalla), pienennä lämpötilaa tai lopeta maskin käyttö välttääksesi mahdolliset matalan asteen palovammat.
- 7) Älä käytä maskia useammin kuin kahdesti päivässä.
- 8) Silmämaskin sisällä on virtapiiri. Älä pura sitä.
- 9) Jos silmämaski on käyttämättömänä pitkään, irrota virtajohto silmämaskista.
- 10) Säilytä silmämaski kuivassa ja viileässä ympäristössä, kosteuden ja valolle altistumisen aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
- 11) Silmämaskia suositellaan vain yli 18-vuotiaille.
- 12) Silmämaski ei ole lelu, joten pidä maski poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran välttämiseksi.


• iFlo-silmämaskin käyttötarkoitus

Silmämaskia käytetään silmäluomien lämpöhoitoihin ja lievittämään silmien väsymystä antamalla lämpöhoitoa silmäluomille. Silmämaskia voidaan lämmittää noin 750 kertaa.

• iFlo-silmämaskin rakenne



Kuva 1. Lämpömaski

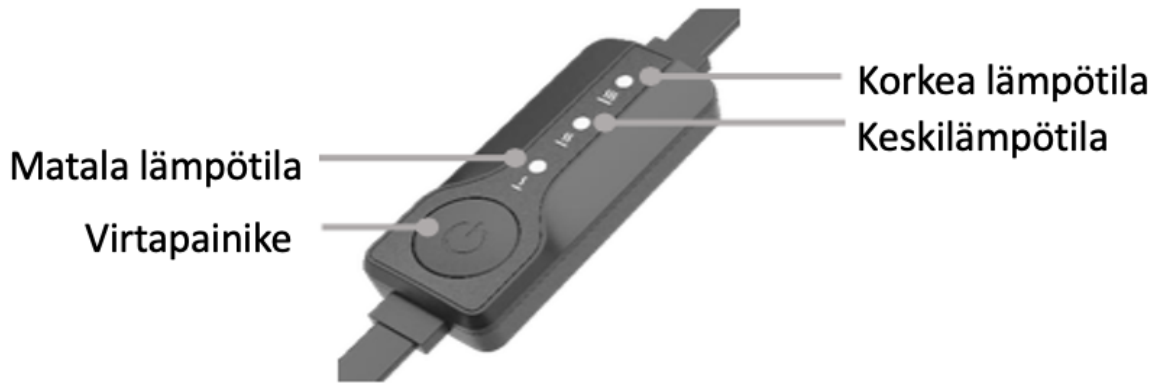

Kuva 2. Lämpötilan kytkin

• iFlo-silmämaskin käyttö

- 1) Liitä silmämaski virtalähteeseen/virtapankkiin (DC 5V/1A) mukana toimitetulla lämpötilansäätökaapelilla.
- 2) Käynnistä laite painamalla lyhyesti virtapainiketta. Kun silmämaski kytketään päälle, lämpötila on korkeimmalla tasolla (44°C)
- 3) Paina virtapainiketta vaihtaaksesi lämpötilaa, 44°C, 41°C ja 39°C välillä. Lämpötilan ilmaisimen väri tarkoittaa seuraavia lämpötiloja:
 ● Korkea (44°C) ● Keski (41°C) ● Matala (39°C)
- 4) Laita silmämaski silmille ja säädä niskahihna sopivaksi.
- 5) Paina FlexStrip kuminauhaa nenälle, jotta silmämaski sopii paremmin kasvoille. (Kts. kuva alla)
- 6) Lämmityksen aikana kuulet pitkän äänimerkin kaksi kertaa, 8 ja 10 minuutin kohdalla. On suositeltavaa räpytellä silmiä voimakkaasti noin 3 kertaa äänimerkkien jälkeen.

• iFlo-silmämaski sammuu 12 minuutin käytön jälkeen automaattisesti.

Halutessasi voit sammuttaa silmämaskin virtapainikkeesta.

- Äänimerkit saat pois painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti 10 sekunnin ajan.




• iFlo-silmämaskin huolto ja puhdistus

- Säilytä silmämaskia omassa pussissaan kosteuden ja likaantumisen välttämiseksi.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos silmämaskissa on toimintahäiriö. Älä pura silmämaskia itse.
- Älä säilytä silmämaskia suoraan auringonpaisteessa tai kosteassa ympäristössä.
- Puhdista pinnalla oleva lika puhtaalla liinalla.
- Jos lika on voimakasta, pyyhi se varovasti neutraalilla pesuaineella ja kostealla liinalla.
- Älä kastele silmämaskia
- Pidä tuote kuivana.

• iFlo-silmämaskin sisäkangas

- Silmämaskin sisäkangas on käsin pestävä ja sen voi vaihtaa.
- Älä pese sisäkangasta koneessa tai kuivaa kuivausrummussa
- Suositeltu vaihtoväli sisäkankaalle on 60 käyttökertaa.

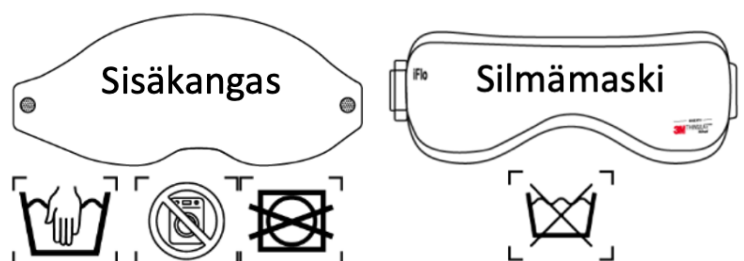

• iFlo-silmämaskin ominaisuudet

Malli	VEM-200
Liitäntä	USB-C
Lämpötilat	44°C, 41°C, 39°C
Lämmityksen kesto	12 minuuttia
Sisäänmenojännite	DC 5V/1A
Tehonkulutus	4W (max.)
Väri	Space grey
Koko	22 x 7 cm
Paino	25g

• Pakkauksen sisältö

Nimi	Määrä
iFlo-silmämaski sisäkankaalla	1 kpl
Lämpötilansäätökaapeli	1 kpl
Vetoketjupussi	1 kpl
Käyttöohje	1 kpl

• Vianmääritys

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Silmämaski ei lämpene	1) Silmämaski on pois päältä. 2) Silmämaski on ollut 12 minuuttia päällä ja katkaissut virran automaattisesti. 3) USB-C liitin ei ole painettuna pohjaan saakka silmämaskin liitäntään.	1) Paina virtapainiketta kevyesti käynnistääksesi maskin. 2) Paina virtapainiketta kevyesti käynnistääksesi maskin. 3) Paina USB-C liitin pohjaan saakka silmämaskin liitäntään. (Kts kuva alla)
Lämpötilaindikaattori ei toimi	1) Lämpötilansäätökaapeli on rikki. 2) Lämpötilan säätökaapeli on huonosti kytketty.	1) Lämpötilansäätökaapeli pitää vaihtaa uuteen. 2) Kytke kaapeli uudelleen.
Punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti	Lämpötilan säätökaapeli tai silmämaskin sisällä olevat virtapiirit ovat oikosulussa.	Katkaise virransyöttö välittömästi ja lopeta silmämaskin käyttö

